


Odsávání mléka nemusí být bolestivé

Jak vybrat tu správnou velikost trychtýře?

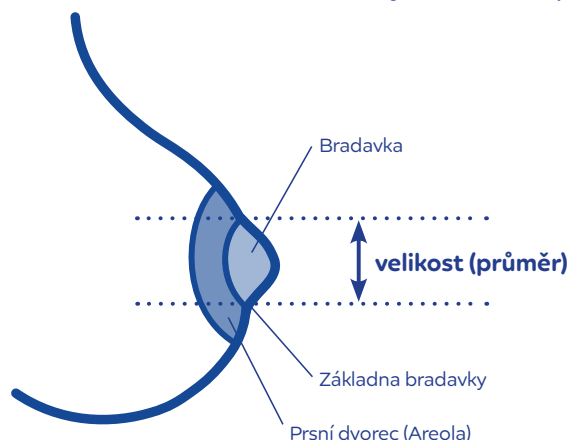

Trychtýř má velký vliv na pohodlí a účinnost odsávání mateřského mléka. Výběr správné velikosti trychtýře nebo vložky usnadňuje dosažení optimálního toku mléka.

Velikost prsou nemusí nutně odpovídat velikosti bradavky. Průměr prsní bradavky určuje velikost trychtýře/vložky.

Pomocí metru nebo pravítka změřte průměr vaší bradavky od základny (přes střed), do měření se nezahrnuje prsní dvorec. Měření udávejte v milimetrech.

Na základě vašeho měření vyberte vhodnou velikost trychtýře:

- průměr vaší bradavky 13–15 mm ➔ vložka 17 mm*
- průměr vaší bradavky 15–17 mm ➔ vložka 19 mm*
- průměr vaší bradavky 18–22 mm ➔ trychtýř 22 mm
- průměr vaší bradavky 23–25 mm ➔ trychtýř 27 mm*

*Není součástí balení, v případě potřeby nutné dokoupit.

DOPORUČENÍ!

Pokud si nevíte rady ohledně velikosti trychtýře, vyzkoušejte si dvě nejbližší velikosti a vyberte si tu velikost, která je pro vás nejpohodlnější.


Někdy je potřeba změřit obě prsa. Může se stát, že budete potřebovat na jedno prso jinou velikost, než na druhé.



Odsávačka PowerPump

Vyzkoušejte základní trychtýř, který je součástí odsávačky – průměr 22 mm. Trychtýř o průměru 27 mm stejně jako vložky o průměrech 17 mm a 19 mm nejsou součástí balení. Trychtýř i vložky do něj lze zakoupit jednotlivě.

1. Silikonový trychtýř jemně přiložte na prso s bradavkou uprostřed.
2. Nastavte maximální sací výkon, který je pro vaše prso nejpohodlnější. Odsávání by vás nemělo bolet.
3. Po stimulační fázi, v průběhu odsávání mateřského mléka, zkontrolujte, zda máte správnou velikost trychtýře/vložky. K tomu vám pomůže následující grafické zobrazení.

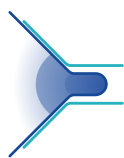


Když je vaše bradavka vtažena do tunelu trychtýře i s částí prsního dvorce – **trychtýř je pro vás příliš velký.**

Zkuste vložit do středu tunelu trychtýře vložku s menším průměrem.



Když je vaše bradavka umístěna ve středu tunelu trychtýře a volně se pohybuje, znamená to, že **velikost trychtýře/vložky je správná.**

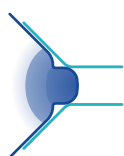

Pokud vaše bradavka tře o stěnu trychtýře – **průměr trychtýře je malý.**

Jestliže je pro vás trychtýř o průměru 22 mm malý, vyzkoušejte větší trychtýř o průměru 27 mm.



1. Vyberte správnou velikost vložky.



2. Vsuňte vámi vybranou velikost vložky do otvoru trychtýře pro zmenšení otvoru.



*Není součástí základního setu, v případě potřeby nutné dokoupit.

Odsávání nemusí být bolestivé

Jak vybrat tu správnou velikost trychtýře/vložky?

Vystříhnete kolečka a zkontrolujete, do kterého se vaše bradavka nejlépe vejde. Bradavka by měla přesně zapadnout do otvoru bez dalšího místa kolem.

Uvedený trychtýř/vložka je pro vás tou správnou velikostí.

Pokud máte pochybnosti mezi dvěma velikostmi, vyzkoušejte obě a zjistěte, která je pro vás nejpohodlnější.

POZNÁMKA!



Pro tisk tohoto souboru změňte nastavení tiskárny na „100% měřítko“, aby byla zachována správná velikost kruhů.



**vložka
17 mm***



13 mm



14 mm



15 mm

**vložka
19 mm***



15 mm



16 mm



17 mm

**trychtýř
22 mm**



18 mm



20 mm



22 mm

**trychtýř
27 mm***



23 mm



24 mm



25 mm

*Není součástí balení, v případě potřeby nutno zakoupit.